

G-RINSE™

Roztok na omytí kontaktních materiálů a cervixu.

G-RINSE™ hydrogenuhličitanem pufrovaný solný roztok.

G-RINSE™ neobsahuje proteiny. Obsahuje penicilin G o farmaceutické čistotě jako antibakteriální látku.

Určeno pro humánní asistovanou reprodukci, klinicky testováno.

Pokyny pro skladování a stabilita

Skladujte v temnu při teplotě +2 až +8°C.

G-RINSE™ je stabilní do data expirace uvedeného na štítcích lahviček a na Certifikátu analýzy dané šarže. Nelze garantovat stabilitu roztoku po otevření.

Před použitím preekvilibrujte při +37°C a 6 % CO₂.

Pokyny pro použití

Následující postup je obecným návodem pro použití G-RINSE™. Více informací o doporučeném použití G-RINSE™ naleznete v „GIII Series Manual“. Manuál je dostupný na vyžádání od Vitrolife a lze ho objednat na webových stránkách firmy, www.vitrolife.com. Pokyny pro použití v jazycích zemí evropské unie jsou také dostupné na webových stránkách.

Omytí pomůcek a cervixu: Preekvilibrujte G-RINSE™ při +37°C a 6 % CO₂. Propláchněte lumen aspirační jehly a hadičky a proplachovou tekutinu ze soupravy vylejte. Před aspirací oocytů omyjte cervix pacientky roztokem G-RINSE™.

Specifikace

sterilně filtrováno a testováno

SAL 10⁻³

bakteriální endotoxiny (LAL test)
[IU nebo EU/ml]

< 0,25

Výsledky zkoušek každé šarže jsou uvedeny v Certifikátu analýzy přiloženém u dodávky. Další kopie jsou dostupné na vyžádání.

Bezpečnost

Biokompatibilní podle normy ISO 10993.

Výstrahy a varování

Nepoužívejte G-RINSE™, je-li zakalený.

G-RINSE™ obsahuje penicilin G. Pro zachování sterility Vitrolife doporučuje, aby se s lahvičkou manipulovalo asepticky.

Pouze pro vnější použití. Neaplikovat injekčně.

Varování: zákon vymezuje prodej tohoto výrobku na žádost lékaře.

Technická podpora pro Evropu:

Tel.: +46-31-721 80 22

E-mail: support.fertility@vitrolife.com

Vyrábí Vitrolife, Kugsbacka, Švédsko

V ČR a SR distribuuje:

Pentagen s.r.o.

Tel.: 606 787 606

www.pentagen.cz